

Nasal Cannula, Tubing 사용자 매뉴얼

• 외형


1) 1600-7, 1600-7-50, 1615-7, 1615-7-50, 16SOFT-4, 16SOFT-4-50, 16SOFT-7, 16SOFT-7-50, 16SOFT-PED-7, 16SOFT-PED-7-50, 16SOFT-TOD-7, 16SOFT-TOD-7-50



2) 2001-1, 2001-1-50, 2002-7, 2002-7-50, 2014-14, 2014-14-50, 2025-25, 2025-25-25, SO-1790, SO-1790-50




3) 001366, 001366-50

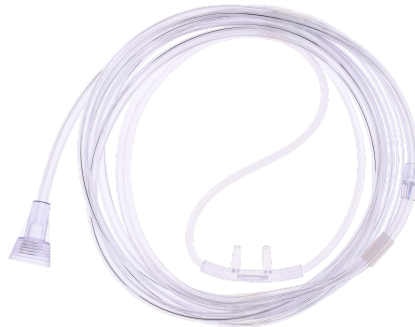

• 외형 설명

1) 1600-7, 1600-7-50, 1615-7, 1615-7-50, 16SOFT-4, 16SOFT-4-50, 16SOFT-7, 16SOFT-7-50, 16SOFT-PED-7, 16SOFT-PED-7-50, 16SOFT-TOD-7, 16SOFT-TOD-7-50, 001366, 001366-50

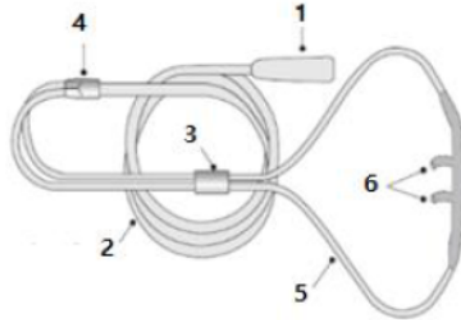


번호	명칭	설명
1	End Connector	Oxygen extension tubing 또는 oxygen flow outlet과 연결되는 부위
2	Supply Tubing	산소가 전달되는 부위
3	Slide Bolo (Adjuster)	환자의 머리에 고정시키기 위해 조절하는 장치
4	Wye Connector	산소가 환자의 양쪽 코로 전달되기 위한 부위
5	Headset Loop	환자의 머리에 고정시키는 역할
6	Nasal Prongs	산소가 환자 코로 들어가는 부위

2) 2001-1, 2001-1-50, 2002-7, 2002-7-50, 2014-14, 2014-14-50, 2025-25, 2025-25-25, SO-1790, SO-1790-50




번호	명칭	설명
1	Tubing	산소가 전달되는 부위
2	End Piece	한쪽은 nasal cannula 혹은 oxygen mask tubing, 다른 한쪽은 bubble humidifier bottle 혹은 oxygen flow outlet 과 연결되는 부위

• 치수

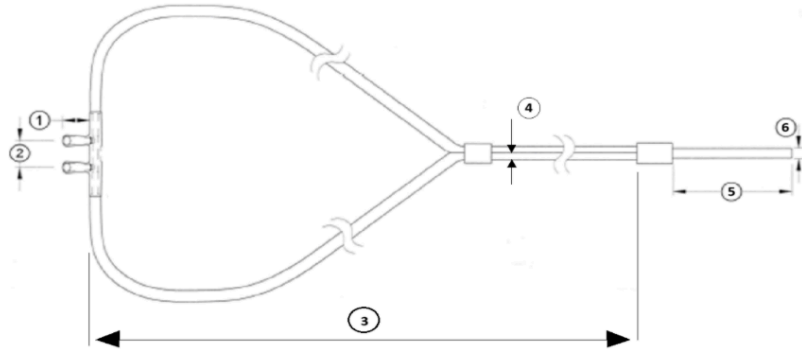

모델명	1	2	3	4	5	6
1600-7 (1ea)	1.02cm	1.6cm	48.26cm	0.33cm	2.13m	6.2mm
1600-7-50 (50ea/1box)	1.02cm	1.6cm	48.26cm	0.33cm	2.13m	6.2mm
1615-7 (1ea)	0.76cm	1.6cm	48.26cm	0.33cm	2.13m	4.3mm
1615-7-50 (50ea/1box)	0.76cm	1.6cm	48.26cm	0.33cm	2.13m	4.3mm
16SOFT-4 (1ea)	1.02cm	1.6cm	48.26cm	0.33cm	1.22m	6.2mm
16SOFT-4-50 (50ea/1box)	1.02cm	1.6cm	48.26cm	0.33cm	1.22m	6.2mm
16SOFT-7 (1ea)	1.02cm	1.6cm	48.26cm	0.33cm	2.13m	6.2mm
16SOFT-7-50 (50ea/1box)	1.02cm	1.6cm	48.26cm	0.33cm	2.13m	6.2mm
16SOFT-PED-7 (1ea)	0.9cm	1.2cm	48.26cm	0.33cm	2.13m	5.46mm
16SOFT-PED-7-50 (50ea/1box)	0.9cm	1.2cm	48.26cm	0.33cm	2.13m	5.46mm
16SOFT-TOD-7 (1ea)	0.8cm	0.9cm	48.26cm	0.23cm	2.13m	4.3mm
16SOFT-TOD-7-50 (50ea/1box)	0.8cm	0.9cm	48.26cm	0.23cm	2.13m	4.3mm
001366 (1ea)	1.2cm	1.6cm	48.26cm	0.33cm	2.13m	5.46mm
001366-50 (50ea/1box)	1.2cm	1.6cm	48.26cm	0.33cm	2.13m	5.46mm

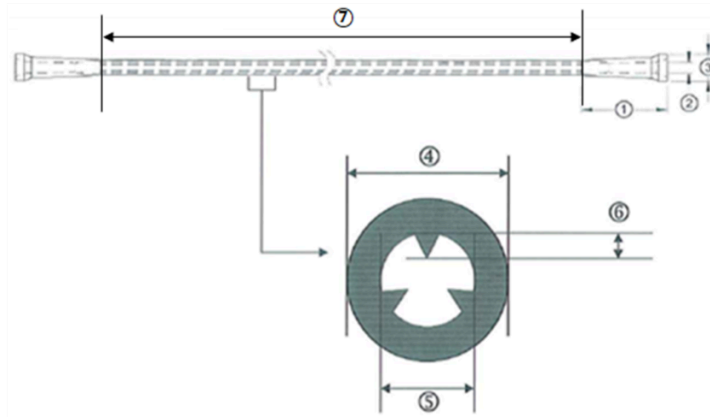

모델명	1	2	3	4	5	6	7
2001-1 (1ea)	37mm	4.8mm	12mm	5.8mm	4.2mm	.80mm	0.3m
2001-1-50 (50ea/1box)	37mm	4.8mm	12mm	5.8mm	4.2mm	.80mm	0.3m
2002-7 (1ea)	37mm	4.8mm	12mm	5.8mm	4.2mm	.80mm	2.1m
2002-7-50 (50ea/1box)	37mm	4.8mm	12mm	5.8mm	4.2mm	.80mm	2.1m
2014-14 (1ea)	37mm	4.8mm	12mm	5.8mm	4.2mm	.80mm	4.2m
2014-14-50 (50ea/1box)	37mm	4.8mm	12mm	5.8mm	4.2mm	.80mm	4.2m
2025-25 (1ea)	37mm	4.8mm	12mm	5.8mm	4.2mm	.80mm	7.6m
2025-25-25 (25ea/1box)	37mm	4.8mm	12mm	5.8mm	4.2mm	.80mm	7.6m
SO-1790 (1ea)	37mm	4.8mm	12mm	5.8mm	4.2mm	.80mm	0.53m
SO-1790-50 (50ea/1box)	37mm	4.8mm	12mm	5.8mm	4.2mm	.80mm	0.53m

• 사용방법

가. 사용 전 준비사항

제품의 포장상태, 이물질 유무, 외관상 훼손 상태를 확인합니다.

나. 사용방법

1) 1600-7, 1600-7-50, 1615-7, 1615-7-50, 16SOFT-4, 16SOFT-4-50, 16SOFT-7, 16SOFT-7-50, 16SOFT-PED-7, 16SOFT-PED-7-50, 16SOFT-TOD-7, 16SOFT-TOD-7-50, 001366, 001366-50

1. 손을 씻고 포장 상자에서 캐놀라를 꺼냅니다.
2. 캐놀라 말단을 산소 공급원에 연결합니다(예: 산소 연장 튜브 또는 산소 배출구).
3. 산소발생기의 유량 조절 노브를 처방된 유량에 맞춥니다.
4. 코에 삽입하는 부분에서 가스가 흐르는지 확인합니다.
5. 코에 삽입하는 부위가 위와 얼굴을 향하게 합니다. 콧구멍에 삽입합니다.
6. 헤드셋 고리를 양쪽 귀 위로 감거나 헤드셋 루프를 머리 뒤에 고정합니다.
7. 끈 길이 조절 부위를 턱 밑이나 머리 주위로 밀어 올립니다.
8. 끈 길이 조절 부위와 턱 사이에 손가락 두 개 이상이 들어갈 수 있도록 충분한 공간을 두십시오.

2) 2001-1, 2001-1-50, 2002-7, 2002-7-50, 2014-14, 2014-14-50, 2025-25, 2025-25-25, SO-1790, SO-1790-50

산소 튜브 외에도 튜브를 비강 캐놀라 또는 산소 마스크에 연결하기 위한 튜브 커넥터가 필요합니다.

1. 손을 씻고 포장을 열고 산소 튜브를 꺼냅니다.
2. 튜브 커넥터의 말단을 산소 튜브 말단에 삽입합니다.
3. 튜브 커넥터의 다른 말단을 비강 캐놀라 또는 산소 마스크 튜브의 끝에 삽입합니다.
4. 튜브를 부드럽게 당겨 단단히 연결되었는지 확인합니다.
5. 산소 튜브의 다른 쪽 끝을 가슴기 통의 배출구 또는 산소 공급원의 배출구와 연결합니다.
6. 산소발생기의 유량을 설정합니다. 코 안이나 캐놀라에서 가스가 흐르는지 확인합니다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

본 제품은 일회용 의료기기이므로 사용 후 폐기합니다.

• 사용시 주의사항

1. 캐놀라와 튜브의 연결이 느슨하여 산소가 새는 곳이 없도록 정기적으로 점검한다.
2. 가슴물통에 항상 적정 수량이 유지될 수 있도록 한다.
3. 포장을 뜯은 제품은 1명의 환자만이 사용하여야 하며, 다른 환자에 의해 재사용되지 않도록 한다.
4. 본 제품은 일회용제품이므로 재사용을 금한다.