

호흡기용 튜브 사용자 매뉴얼

• 외형

WM29988




WM24445



• 외형 설명


1) WM29988, WM24445

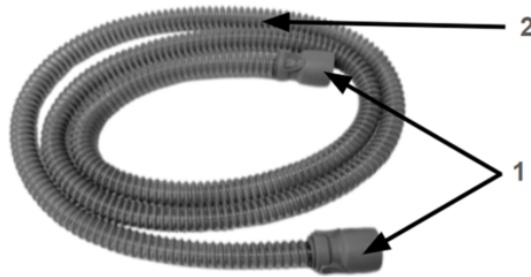

번호	명칭	설명
1	커넥터 (Connector)	호흡 치료 장치와 마스크에 연결되는 부분으로 컵이라고도 한다.
2	튜브 (Tube)	호흡 가스를 환자에게 전달하는 튜브이다.


• 치수

1) WM29988

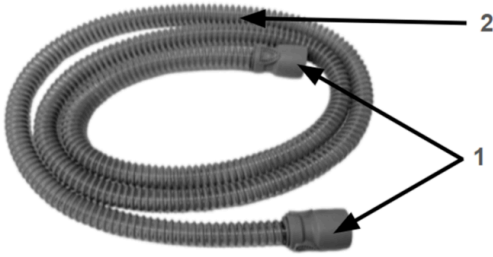

번호	명칭	치수
1	커넥터 (Connector)	지름 : 15 mm
2	튜브 (Tube)	길이 : 1.83 m

2) WM24445

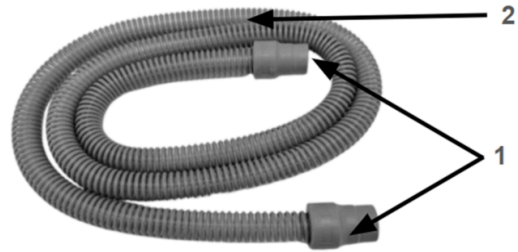

번호	명칭	치수
1	커넥터 (Connector)	지름 : 19 mm
2	튜브 (Tube)	길이 : 1.83 m

• 사용방법

가. 사용 전 준비사항

제품의 포장상태, 이물질 유무, 외관상 훼손 상태를 확인합니다.

나. 사용방법

1. 튜브를 패키지에서 꺼냅니다.
2. 튜브를 연결할 기기를 평평한 곳에 놓는다.
3. 튜브를 기기 후면에 있는 공기 배출구에 연결한다.
4. 튜브에 마스크를 연결한다.
5. 튜브가 머리 나 목 주위에 비틀리지 않도록 배열한다.
6. 분리할 때 아래의 방법에 따른다.
 - 1) 튜브의 커넥터 부분을 잡고 기기에서 당겨 뺀다.
 - 2) 튜브의 커넥터와 마스크의 회전 고리 부분을 모두 잡고 분리한다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

1. 튜브를 미지근한 물과, 비누가 섞인 물로 세척합니다.
2. 튜브를 깨끗한 물로 헹궈 줍니다.
3. 두 개의 컵가 아래로 처진 상태로 튜브를 걸어 놓습니다.
4. 직사광선을 피하고 자연 건조를 시키도록 한다.
5. 각 부분에 손상이 없는지 확인하고 필요한 경우 교체한다.

• 사용시 주의사항

1. 향후 참고를 위해 이 사용 설명서를 보관한다.
2. 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 자만이 사용할 수 있다.
3. 제품 본래의 사용목적 외의 다른 용도로 사용해서는 안 된다.
4. 유효기간이 경과된 제품을 사용하지 않는다.
5. 손상된 튜브를 사용하지 않는다.
6. 본 제품과 연결되어 함께 사용되는 장치, Humidifier 및 마스크를 연결하거나 분리할 때 항상 튜브의 커넥터 부분을 잡고 분리해야 한다.
7. 튜브를 가열하거나 (>60°C / >140°F) 멸균하면 안 된다.
8. 튜브는 한 명의 환자만 사용할 수 있다.
9. 세척 후에 튜브는 (전자레인지) 오븐, 헤어드라이어 또는 기타 가전제품을 사용하여 건조해서는 안 된다. 세척 지침을 참조한다.
10. 튜브가 손상될 수 있으므로 튜브 내부는 부드러운 솔 등의 물체로만 청소할 수 있다.
11. 식기 세척기에 튜브를 세척 하면 안 된다.
12. 본 제품을 청소할 때 강한 비누, 세제, 솔벤트 또는 알코올을 사용하여 튜브를 청소하면 안 된다.
13. 튜브를 분해하거나 손상시키면 안 된다.
14. 튜브가 손상될 수 있으므로 튜브 입구에 물건을 넣거나 떨어뜨리면 안 된다.
15. 튜브가 손상될 수 있으므로 튜브 위에 물건을 올려놓으면 안 된다.
16. 튜브가 손상되었거나(구멍, 주름, 찢어짐 등) 더 이상 작동하지 않는 경우 수리하면 안 된다. 이 경우에는 즉시 튜브를 교체해야 한다.
17. 튜브는 12개월 이상 사용해서는 안 되며 이 기간이 끝나면 교체해야 한다.
18. 마지막 폐기 전에 다른 환자가 사용하지 않도록 오래된 튜브에 라벨을 붙인다.
19. 본 제품에 대해 예상치 못한 작동이나 이슈가 발생하거나 추가 지원 및 정보가 필요한 경우 판매업체에 문의해야 한다.

20. 튜브는 소모품이며 처음 사용하기 전에 튜브를 확인해야 한다. 그렇지 않으면 보증 청구가 제외된다.
다음과 같은 경우 보증이 만료된다.

- 개입, 수정, 확장, 수리 및 유지 보수를 제조업체가 승인하지 않은 사람이 수행한 경우
- 제조업체가 제품에 사용하도록 승인하지 않은 다른 제조업체의 액세서리 및 예비 부품을 사용하는 경우
- 제품을 사용 설명서에 기재된 것과 다르게 사용한 경우
- 부품이 마모되었을 경우
- 불가항력(예:번개)으로 인해 제품이 손상되었을 경우
- 사용 설명서에 설명된 위생 및 청소 지침을 준수하지 않았을 경우

21. 사용자 또는 환자는 기기와 관련하여 발생한 심각한 사고를 제조업체, 사용자, 환자가 거주하는 회원국의 관할 당국에 보고해야 한다.